

Ansell

AnsellGUARDIAN® Kimyasal Raporu

Ansell

Ansell



Feragat

Bu raporda, bazı kişisel koruyucu donanımların (KKD) seçtiğiniz ürünlere karşı sunduğu koruma performansı hakkında bilgiler bulacaksınız. Bu bilgilerin amacı, hedeflenen koşullarda en yüksek seviyede koruma sağlayabilecek Ansell KKD ürünleri hakkında doğru kararlar verme ve kuruluşunuza yönelik bir risk analizi gerçekleştirme konusunda kuruluşunuzdaki sağlık ve emniyet görevlilerine yardımcı olmaktır.

Nüfuz etme süreleri ile emniyetli giyme sürelerinin eşit olmadığını vurgulamak isteriz. Emniyetli giyme süreleri, KKD'nin doğru giyilip giyilmediğine, ortam sıcaklığına, kimyasalların toksisite seviyelerine ve diğer bazı faktörlere göre değişebilir. Burada sunulan nüfuz etme bilgileri, ana koruyucu malzemeyle sınırlıdır. Nüfuz etme süreleri, dikişlerin, fermuarların, vizörlerin veya KKD'nin diğer bağlantı yerleri ile bileşenlerinin çevresinde farklılık gösterebilir. Söz konusu göreve uygun KKD seçilmeden önce bir risk analizi yapmak kuruluşunuzun sağlık ve emniyet görevlisinin sorumluluğudur. Herhangi bir konu hakkında detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bize ulaşın.

KKD'nin koruyucu özelliklerine dair tahminler eldeki verilere, laboratuvar testi sonuçlarının yorumlanmasına ve kimyasalların bileşimi hakkında bilgilere dayanmaktadır. Kimyasalları birbiriyle karıştırmanın yaratacağı sinerjik etkiler dikkate alınmamıştır. Yeni testler yapıldıkça veya yorumlamalar için daha sağlam bir temel sunacak olan yeni bilgiler elde edildikçe tahminler de değiştirilebilir. Bu nedenlerden ötürü, bu raporda sunulan tüm bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve Ansell bu raporda yer alan herhangi bir ifadeyle ilgili olarak garantiler dahil her tür sorumluluğu tamamen reddeder.

El Koruması Açıklaması

Nüfuz etme süreleri		
	<10	Tavsiye edilmez
	10-30	Sıçrama koruması
	30-60	Sıçrama koruması
	60-120	Orta seviye koruma
	120-240	Orta seviye koruma
	240-480	Yüksek koruma
	>480	Yüksek koruma

Normalleştirilmiş nüfuz etme süresi, söz konusu kimyasalın malzemeye 1,0 µg /cm²/dak (EN ISO 374 uyarınca) veya 0,1 µg /cm²/dak (ASTM F739 uyarınca) hızla nüfuz ettiği süredir (dakika cinsinden).

PS = Fiziksel Hali: A = aerosol, G = Gaz, L = Sıvı , P = yapıştırmak, S = Katı



Ürün Grubu : 93-243.244
Marka : MICROFLEX®
Malzeme : Nitrile
Kalınlık (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Bu tabloda sunulan nüfuz etme süreleri, EN ISO 374 ve ASTM F739 standardına göre değerlendirilmiştir. Sayılar ve (C) sembolü içeren renkli hücreler, akredite bir harici laboratuvar tarafından üretilen, deneysel olarak belirlenmiş verilere.

CAS	Kimyasal Adı	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
64-19-7	Acetic acid	10.0	L	290' c	240' c
64-19-7	Asetik asit, glasiyal	100.0	L	5' c	5' c
67-64-1	Aseton	100.0	L	< 1' c	< 1' c
67-64-1	Acetone	50.0	L	5' c	5' c
1336-21-6	Amonyum hidroksit	25.0	L	14' c	12' c
100-51-6	Benzil alkol	100.0	L	5' c	5' c
67-66-3	Kloroform	100.0	L	< 1' c	< 1' c
77-92-9	Citric acid, sat. solution	50.0	L	> 480' c	> 480' c
67-68-5	Dimetilsülfoksit	100.0	L	6' c	5' c
64-17-5	Etil alkol	100.0	L	4' c	5' c
64-17-5	Etil alkol	70.0	L	23' c	14' c
64-17-5	Etil alkol	50.0	L	49' c	29' c
50-00-0	Formaldehit	37.0	L	> 480' c	> 480' c
8006-61-9	Gazolin (Benzin)	100.0	L	0' c	0' c
111-30-8	Glutaraldehit, %50	50.0	L	> 480' c	> 480' c
142-82-5	Heptan	100.0	L	38' c	27' c
7647-01-0	Hidroklorik asit	37.0	L	103' c	105' c
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	40.0	L	32' c	12' c
7722-84-1	Hidrojen peroksit	30.0	L	126' c	15' c
67-63-0	İzopropanol	40.0	L	93' c	50' c



Ürün Grubu : 93-243.244
Marka : MICROFLEX®
Malzeme : Nitrile
Kalınlık (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Bu tabloda sunulan nüfuz etme süreleri, EN ISO 374 ve ASTM F739 standardına göre değerlendirilmiştir. Sayılar ve (C) sembolü içeren renkli hücreler, akredite bir harici laboratuvar tarafından üretilen, deneysel olarak belirlenmiş verilere.

CAS	Kimyasal Adı	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
67-63-0	İzopropanol	70.0	L	56' c	40' c
67-63-0	İzopropanol	100.0	L	25' c	22' c
108-38-3	m-Xylene	100.0	L	< 1' c	< 1' c
67-56-1	Metil alkol	100.0	L	< 1' c	< 1' c
71-36-3	n-Bütanol	100.0	L	37' c	32' c
110-54-3	n-Heksan	100.0	L	21' c	17' c
71-23-8	n-Propanol	100.0	L	12' c	11' c
7697-37-2	Nitrik asit	65.0	L	9' c	8' c
7697-37-2	Nitrik asit	10.0	L	> 480' c	> 480' c
7697-37-2	Nitrik asit	50.0	L	10' c	9' c
79-21-0	Perasetik asit	39.0	L	15' c	15' c
25655-41-8	Povidone Idoine solution	10.0	L	> 480' c	> 480' c
57-55-6	Propilen Glikol	100.0	L	> 480' c	> 480' c
1310-73-2	Sodyum Hidroksit	40.0	L	> 480' c	> 480' c
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	12.0	L	> 480' c	> 480' c
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	15.0	L	> 480' c	> 480' c
7664-93-9	Sülfürik asit	96.0	L	11' c	9' c
7664-93-9	Sülfürik asit	50.0	L	> 480' c	> 480' c
121-44-8	Trietilamin	100.0	L	16' c	16' c
	Peracetic acid solution, 30-40%		L	15' c	15' c



Ürün Grubu : 93-243.244
Marka : MICROFLEX®
Malzeme : Nitrile
Kalınlık (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Bu tabloda sunulan nüfuz etme süreleri, EN ISO 374 ve ASTM F739 standardına göre değerlendirilmiştir. Sayılar ve (C) sembolü içeren renkli hücreler, akredite bir harici laboratuvar tarafından üretilen, deneysel olarak belirlenmiş verilere.

CAS	Kimyasal Adı	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
	Skydrol LD4		L	25' C	21' C