

Ansell

AnsellGUARDIAN[®] vegyi jelentés

Ansell

Ansell



Nyilatkozat

Ebben a jelentésben egyes személyi védőfelszerelések (PPE) Ön által kiválasztott vegyszerekkel szembeni barrier teljesítményéről talál adatokat. Ezen adatok funkciója az Ön intézménye egészségvédelmi és biztonsági szakértőjének segítése abban, hogy tájékozottabb döntést tudjanak hozni azon Ansell PPE eszközről, amely a legnagyobb védelmet képes nyújtani az adott körülmények között, és elősegíti intézménye kockázatfelmérésének kivitelezését.

Szeretnénk kiemelni, hogy az áthatolási idők nem egyenlők a biztonságos viselési időtartammal. A biztonságos viselés időtartama változó lehet a környezeti hőmérséklet, a vegyszerek toxicitása, egyéb tényezők, valamint annak függvényében, hogy a PPE-t helyesen vették-e fel. Az itt szereplő, áthatolással kapcsolatos információk a védőeszköz fő anyagára korlátozottak. Az áthatolási idők eltérőek lehetnek a varrásoknál, cipzáraknál, szemüvegeknél, illetve a PPE más illesztéseinél vagy alkatrészeinél. Az intézménye egészségvédelmi és biztonsági szakértőjének felelőssége a kockázatfelmérés kivitelezése a PPE adott feladathoz történő kiválasztása előtt. Ha szeretne erről részletesebben beszélni, kérjük, keressen fel minket.

A PPE barrier tulajdonságainak becsült értékei a jelenleg elérhető adatokon, a laboratóriumi teszteredmények extrapolálásán, valamint a vegyszer összetételével kapcsolatos adatokon alapul. Nem vizsgálták a vegyszerek összekeveréséből eredő szinergista hatásokat. A becsült értékek változhatnak, ha új tesztek elvégzésre kerülnek, vagy új információ kerül napvilágra, jobb alapot képezve az extrapoláláshoz. Ezen okokból a jelen jelentésben szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, és az Ansell teljes mértékben elutasít minden felelősséget, beleértve az itt szereplő kijelentésekkel kapcsolatos bármilyen garanciát.

Jelmagyarázat a kézvédelemhez

Behatolási/átjutási idők		
<10	Nem javasolt	
10-30	Fröccsenés elleni védelem	
30-60	Fröccsenés elleni védelem	
60-120	Közepes védelem	
120-240	Közepes védelem	
240-480	Jó védelem	
>480	Jó védelem	

Normalizált behatolási átjutási idő (percben) az adott vegyszerre vonatkozóan, amely 1,0 µg/cm²/perc (EN ISO 374 szerint) 0,1 µg/cm²/perc (ASTM F739 szerint) sebességgel hatol át az anyagon.

PS = Halmazállapot: A = aeroszol, G = Gáz, L = Folyadék , P = paszta, S = Szilárd



Termékcsoport : 93-401
Márka : Nitrilite®
Anyag : Nitrile
Vastagság (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

A jelen táblázatban szereplő behatolási átjutási időket az EN ISO 374 és ASTM F739 szabvány szerint mérték fel. A számértékeket és a (C) szimbólumot tartalmazó színezett cellák egy akkreditált laboratórium által meghatározott kísérleti adatokon alapulnak.

CAS	Vegyí anyag neve	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
115-20-8	2,2,2-Trichloroethanol	100.0	L	28' C	
51-21-8	5-Fluorouracil (50 mg/ml)	5.0	L		> 240' C
64-19-7	Ecetsav, jégecet	100.0	L	6' C	
75-05-8	Acetonitril	100.0	L	< 5' C	
79-06-1	Acrylamide, aqueous solution	40.0	L	> 480' C	
1336-21-6	Ammónium-hidroxid	25.0	L	7' C	
154361-50-9	Capecitabine (26mg/ml)	2.6	L		> 240' C
41575-94-4	Carboplatin	1.0	L		> 240' C
154-93-8	Carmustine (3.3 mg/ml)	0.33	L		44' C
15663-27-1	Cisplatin (1 mg/ml)	0.1	L		> 240' C
110-82-7	Ciklohexán	100.0	L	67' C	
50-18-0	Cyclophosphamide (20 mg/ml)	2.0	L		> 240' C
68334-30-5	Dízel LS	100.0	L	> 480' C	
67-68-5	Dimetil-szulfoxid	100.0	L	10' C	
114977-28-5	Docetaxel (10 mg/ml)	1.0	L		> 240' C
25316-40-9	Doxorubicin hydrochloride (2 mg/ml)	0.2	L		> 240' C
56390-09-1	Epirubicin HCl (2mg/mL)	0.2	L		> 240' C
64-17-5	Etil-alkohol	70.0	L	31' C	
1239-45-8	Etídium-bromid, telített vizes oldat	4.0	L	> 480' C	
141-78-6	Etil-acetát	100.0	L	< 5' C	



Termékcsoport : 93-401
Márka : Nitrilite®
Anyag : Nitrile
Vastagság (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

A jelen táblázatban szereplő behatolási átjutási időket az EN ISO 374 és ASTM F739 szabvány szerint mérték fel. A számértékeket és a (C) szimbólumot tartalmazó színezett cellák egy akkreditált laboratórium által meghatározott kísérleti adatokon alapulnak.

CAS	Vegyi anyag neve	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
33419-42-0	Etoposide (20 mg/ml)	2.0	L		> 240' C
50-00-0	Formaldehid	37.0	L	> 480' C	
68476-30-2	Tüzelőolaj	100.0	L	60' C	
95058-81-4	Gemcitabine (38mg/ml)	3.8	L		> 240' C
142-82-5	Heptán	100.0	L	60' C	
7722-84-1	Hidrogén-peroxid	30.0	L	22' C	
100286-90-6	Irinotecan (20 mg/ml)	2.0	L		> 240' C
67-63-0	Izopropanol	70.0	L	> 480' C	51' C
67-63-0	Izopropanol	100.0	L	81' C	
64742-81-0	Kerosine, hydrodesulphurised	100.0	L	82' C	
67-56-1	Metil-alkohol	100.0	L	< 5' C	
59-05-2	Methotrexate (25mg/ml)	2.5	L		> 240' C
80-62-6	Methyl methacrylate	100.0	L	2' C	
65271-80-9	Mitoxantrone	0.2	L		> 240' C
71-36-3	n-butanol	100.0	L	37' C	
110-54-3	n-hexán	100.0	L	> 480' C	
61825-94-3	Oxaliplatin (5.0 mg/mL)	0.5	L		> 240' C
33069-62-4	Paclitaxel (6.0 mg/mL)	0.6	L		> 240' C
174722-31-7	Rituximab (10mg/mL)	1.0	L		> 240' C
1310-73-2	Nátrium-hidroxid	40.0	L	> 480' C	



Termékcsoport : 93-401
Márka : Nitrilite®
Anyag : Nitrile
Vastagság (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

A jelen táblázatban szereplő behatolási átjutási időket az EN ISO 374 és ASTM F739 szabvány szerint mérték fel. A számértékeket és a (C) szimbólumot tartalmazó színezett cellák egy akkreditált laboratórium által meghatározott kísérleti adatokon alapulnak.

CAS	Vegyí anyag neve	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
7664-93-9	Kénsav	96.0	L	8' C	
7664-93-9	Kénsav	50.0	L	> 480' C	
127-18-4	Tetraklór-etilén	100.0	L	< 5' C	
52-24-4	thiotepa (10mg/ml)	1.0	L		118' C
71486-22-1	Vinorelbine	1.0	L		> 240' C
1330-20-7	Xilol, izomerkeverék	100.0	L	< 5' C	